

# femimi

## 耳あな型デジタル集音器 VR-L50

### 取扱説明書

この度は「フェミミ」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用になる前に、この仕様書および取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。



この製品は集音器で「聞こえ」をサポートするものです。補聴器ではありません。なお、装用者の聞こえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。

本製品のご使用方法については同梱のスタートアップガイドをご参照ください。



## 安全上のご注意（必ずお守りください）

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。






### ■ 警告、注意について

 <b>警告</b>	この表示の欄は、使用者が死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容です。
 <b>注意</b>	この表示の欄は、使用者が軽傷を負う可能性または物的損傷の発生する可能性が想定される内容です。







### ■ 図記号の例

	このような絵表示は、必ず行っていただく強制の内容です。
	このような絵表示は、禁止（やってはいけないこと）の内容です。

ここに示した警告や注意事項は、集音器を正しく使っていただき、装用者や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。以下の項目をお読みになり、取り扱いにご注意ください。

 <b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>本機は乳幼児の手の届かないところへ置いてください。飲み込むと窒息の危険を伴う小さなパーツを含んでいます。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。</li><li>テグスが切れ耳あなに集音器が残って外れない場合は、ただちに医師へご相談ください。また、テグスが切れた集音器のご使用は控えてください。</li></ul>	
 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>適切な音量でご使用ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力が大きく損なわれる原因となります。</li><li>集音器を装着して炎症が生じたら…この集音器の皮膚に接触する部分には、かぶれや炎症などを起こしにくい素材を使用していますが、装用者の体質によっては、まれにかぶれや湿疹などを生じることがあります。このような時は、ただちに集音器の装着を中止し医師へご相談ください。</li><li>病院内の検査機器にご注意ください。MRIやCTスキャナーなどの検査は集音器に悪影響を与える可能性がありますので、同種の検査中は集音器を外してください。事故や故障の原因となります。</li><li>集音器をご使用になる前に、イヤークリップや耳あかガードが正しく取り付けられているか確認してください。</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>衝撃・熱を避けてください。集音器に強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。また、直射日光の強いところや炎天下の車内、火のそば、ストーブの上面など高温となる場所での使用・放置はしないでください。</li><li>本製品は防滴・防水仕様ではありません。集音器を水や他の液体に浸すことは、故障の原因となりますので、絶対に避けてください。集音器をしたまま泳いだり、お風呂に入ったり、洗顔したりしないでください。</li><li>シンナー、ベンジン、ベンゾールまたは濡れた布で拭くことは避けてください。</li><li>集音器を分解したり、ご自分で修理・改造など絶対にしないでください。</li><li>集音器を乾燥させる目的で、電子レンジ、食器乾燥機、ヘアドライヤーなどの電気乾燥機を使用しないでください。</li><li>集音器を他人に貸したり、他人から借りたりしないでください。音量の調節が合わず耳を傷めたり、病気などの感染の恐れがあります。</li><li>一度利用した耳あかガードは再利用しないでください。脱落する危険性があります。</li></ul>	

### 電池についての安全上のご注意

 <b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>電池の液が目に入らないように十分に注意してください。万一目に入ったときは失明などの恐れがありますので、目をこすらず水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。</li><li>電池を誤って飲み込んだ場合は、ただちに医師へ相談してください。</li><li>電池は乳幼児の手の届かないところへ置いてください。</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>電池をショートさせたり、ネックレスなどの金属製のものと一緒に携帯・保管しないでください。</li></ul>	
 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>必ず指定したタイプの電池を使用してください。</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>＋、－を逆向きに入れないでください。</li><li>空気電池は充電式ではないので、充電しないでください。</li></ul>	

### その他使用上のご注意

- はじめて集音器をお使いになる場合は慣れるのに数週間かかる場合があります。
- 集音器を装着してもよく聞き取れない音もあります。小さすぎる音、遠くの音や周囲の雑音が多い環境下での音声は十分に聞き取れないこともあります。このような場合は音源に近づいてください。
- ハウリング（ピーピー音）にご注意ください。イヤークリップがきちんと収まっていない場合や、イヤークリップのサイズが合っていない場合、抜けかけてすき間ができた場合などは特にハウリングが起りやすく、装用者に不快感を与えるばかりでなく、周囲の人にも迷惑をかけることがあります。ご自分でハウリング音を確認できない場合は、ご家族など周囲の人に聞いてもらい、集音器を正しく入れ直してください。
- 低周波治療器・電磁（IH）調理器などによって集音器に雑音が発生することがあります。
- 空気電池は石油ヒーターやガスヒーターなどの暖房器具から発生する二酸化炭素により、電解液が劣化することがありますので、火気を用いる暖房器具を使用する場合は換気を十分に行ってください。
- ご不要になった集音器およびその付属品は、お住まいの市町村の指示に従って廃棄してください。
- イヤークリップの交換が難しい場合は、ご家族などをお願いしてイヤークリップの交換を行ってください。

## 仕様

最大出力音圧レベル…………… 114 dB  
最大音響利得…………… 38 dB  
使用可能時間…………… 約165時間 \*1  
電池サイズ…………… 空気電池 PR41(312) 1.4V  
本体質量…………… 1 g(電池除く)  
本体寸法…………… 20.7×10.8×13.6 mm  
(イヤーチップ含む、突起部除く)  
付属品 …………… お試し用電池 PR41(312)、  
イヤーチップSサイズ、Lサイズ 各1個、  
収納ケース、お掃除ブラシ、耳あかガードキット、  
スターターガイド、注意紙、保証書、取扱説明書(本書)

\*1 使用時の環境条件：温度0℃～40℃、湿度40℃ / 90%以下  
(結露無きこと)  
周囲の温度や使用状況により連続使用時間は異なる場合があります。  
※本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

## 困ったときは

故障かな?と思ったら以下の内容を確認してください。

### ■音が聞こえない、音の大きさが不十分

- 電池が入っていますか?  
→ 電池ケースを確認してください。
- 電池が消耗していませんか?  
→ 新しい電池に交換してください。
- 音の出入口が詰まっていますか?  
→ 音の出入口、イヤーチップを掃除してください。耳あかガードを交換してください。
- 装着者の耳に耳あかは詰まっていますか?  
→ 医師に相談してください。
- 設定音量が小さくありませんか?  
→ 可能であれば音量を上げてください。

### ■ハウリング(ピーピー音)がする

- 集音器が正しく耳の穴に挿入されていますか?  
→ 集音器を一度取り出して注意して入れ直してください。
- イヤーチップは耳に合っていますか?  
→ 別のサイズのイヤーチップに交換してください。

本製品を装着した状態で携帯電話や固定電話を使用する際、耳にぴったりと密着するとピーというハウリング音が鳴る場合があります。その際は本製品の音量設定を下げる、または電話機の受話器を少し耳から離してみると収まる場合があります。

### ■音が不明瞭、音がひずむとき

- 電池が消耗していませんか?  
→ 新しい電池に交換してください。

### ■電子音(ピピッ)に混ざってピー音が鳴る

- 異常ではありません。電池寿命ですので新しい電池に交換してください。

※上記の確認を行っても解決しない場合は、ご購入先またはサポートシートに記載のお客さま相談窓口にご相談ください。

## 保証とアフターサービス

### 保証書(別添)について

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。保証書に販売店名や購入日の記載がない場合は、本製品のご購入の際に受け取られた、購入日が明記されている購入証明書(レシート、納品書、受注メールなど)が必要となります。保証書とともに大切に保管してください。

保証期間はご購入日から1年間です。

### 補修用性能部品の最低保有期間

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 連絡していただきたい内容

- ご住所
- お名前
- お電話番号
- 製品名：耳あな型デジタル集音器
- 型番：VR-L50
- お買い上げ日
- 故障の状況(できるだけ詳しく)

### ■保証期間中は：

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社の保証規定に基づき修理いたします。

### ■保証期間が過ぎているときは：

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

## お問い合わせ窓口

修理、取り付け、他の製品との接続などに関しては、お買い求めの販売店へお問い合わせください。お買い求めの販売店に修理の依頼ができない場合は、下記窓口へお問い合わせください。

### 【お問い合わせ窓口】

サービス・お問い合わせ

<https://www.otomoa.com/product/support/>

こちらからもアクセスできます→



令和4年4月現在

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。

©2022 オトモア株式会社

オトモア株式会社

〒141-0021 東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前3階

Printed in China <GRA1001-A>